



# TEG Manager<sup>®</sup>

ソフトウェアソリューション

必要な場所で必要なタイミングで  
データを手に入れます。



  
**HAEMONETICS<sup>®</sup>**



## 解釈ガイダンスモジュール

### 試験結果の解釈を容易にします。

TEG Manager<sup>®</sup>ソフトウェアと併用するために開発された解釈ガイダンスモジュールを用いることで、試験結果と合わせて施設のガイドラインに合わせてカスタマイズしたメッセージを表示させることができます。

試験結果の解釈が容易になり、検査室や手術室など、装置の場所ごとにパラメータの値に対応したメッセージを設定することができます。

また、事前に設定したテンプレートをベースに病院ごとの設定を作成することで、手動で入力したときに起こりやすいエラーを防止します。

# TEG Manager<sup>®</sup>

## ソフトウェアソリューション

TEG Manager は、完全一体型のソフトウェアソリューションを介して試験情報への容易なアクセスを提供することにより、医師による患者の止血管理を補助するために開発されました。

TEG Manager ソフトウェアを使用すると、病院内の TEG<sup>®</sup> 6s 装置の試験データを遠隔表示できます。

TEG Manager ソフトウェアはウェブベースのプラットフォームで設計されており、試験データの中央保管場所となります。また、このソフトウェアにより、接続されているすべての TEG<sup>®</sup> 6s 装置について、それらの設置場所にかかわらず、管理及び監視を行うことができます。






試験結果を容易に確認  
するためのオンデマンド  
アクセスを提供します。

- サンプルをスキャンして患者情報を確認してから試験を行うことにより、患者の安全性を高めます。
- TEG 装置が病院内のどこに設置されている場合でも、実施中の TEG® 試験を表示できるため、治療までの時間が短縮します。
- 同一患者において、院内のどこで行った試験結果でも統合して重ね合わせることができるため、実施中の試験と過去の試験との比較が容易となります。
- 複数の試験結果についてレポートを作成することができます。
- 利用可能な解釈ガイダンスモジュールを使用して、施設のガイドラインに基づき各パラメータ又はパラメータ範囲に対するメッセージをカスタマイズできます。
- 試験の進行に伴って、順次表示されるパラメータの進展を監視することができます。

## TEG®装置への遠隔アクセスによって、 デバイス及びユーザーの管理を最適化します。


- エラーを迅速に特定して診断し、接続されているすべての TEG 6s 装置の状況及びソフトウェアバージョンを表示します。
- 使用レポートの実行によって、分析装置の使用状況を確認できます。
- TEG 6s 装置のユーザーアカウント及びパスワードの管理によって、セキュリティを強化することができます。
- LDAP の統合によって、TEG Manager® のユーザーパスワードを管理することができます。

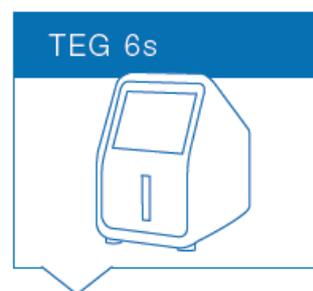

TEG Manager ソフトウェア

病院の LIS システム

TEG Manager へのウェブベースのアクセス

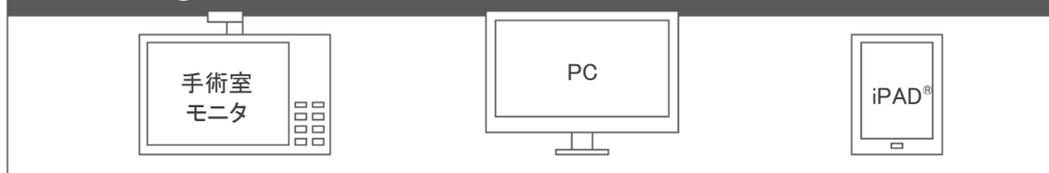

注: デスクトップクライアントは必須ではありません。

## 双方向接続によって、病院システムへの安全で シームレスな情報の流れを実現します。

- シームレスなデータ提供及びデバイス統合のために、TEG Manager ソフトウェアを外部システムに接続します。
- ADT メッセージを使用して、TEG Manager 内に患者リスト及び情報を構築します。
- 試験結果は、HL7®フォーマットで TEG Manager から病院の LIS に送信されます。
- 臨床レポートを PDF フォーマットで病院システムに自動送信することが可能です。

## 必要な動作環境

少なくとも以下を備えたサーバ(仮想又は物理)が必要です。

- 64ビットプロセッサ/OS @ 2GHz
- RAM 4 GB
- ハードディスクの空き容量 100 GB
- Microsoft® .NET Framework 4.5
- デバイスファームウェアバージョン 1.6 以降で有効な Windows Server® 2012 R2 Standard (TLS 1.2 に対応)
- SQL Server® 2012、2014 又は 2016
- IIS 8.5

TEG®止血管理システムにより  
血液凝固の全体像を把握することで、  
患者ごとの治療を選択することができます。



### 詳細情報について

当社のウェブサイト([www.haemonetics.com](http://www.haemonetics.com))を  
ご覧いただくか、Haemonetics 社の営業担当まで  
お問い合わせください。



Haemonetics S.A.  
Signy Centre, Rue Des Fléchères 6  
1274 Signy-Centre  
Switzerland

世界各国の事業所の場所及び連絡先については、[www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations) をご参照ください。

© 2018 Haemonetics Corporation. Haemonetics、TEG 及び TEG Manager は米国又は米国外の Haemonetics Corporation の商標又は登録商標です。HL7 は Health Level Seven International, Inc.の商標です。Microsoft、Windows Server 及び SQL Server は Microsoft Corporation の商標です。iPAD は Apple, Inc.の商標です。07.2018 USA. COL-COPY-001255-JA(AA)

Haemonetics S.A. ■ Signy Centre ■ Rue des Fléchères ■ P.O. Box 262 ■ 1274 Signy-Centre ■ Switzerland ■ [www.haemonetics.com](http://www.haemonetics.com)